

PIKAKAHVAT

ROTH Mobeli

IMUELEMENTTIKAHVAT


Siirrettävät kahvat kotiin, julkisiin tiloihin ja vaikka matkalle mukaan. ROTH Mobeli -pikakahvat tuovat lisää omatoimisuutta arkeen!

Tukikahvat on helppo kiinnittää ja irrottaa – uudelleen ja uudelleen. Erikoiskumista valmistetut 12 cm imuelementit kiinnittyvät lähes kaikkiin ei-huokosiin pintoihin.

Kahvoja saa eri pituisina erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kaikissa malleissa on turvatunnistin, joka valvoo imuelementin imutehoa. Tunnistin ilmaisee, jos imuteho on heikentynyt ja kahva vaatii uudelleen kiinnitystä.



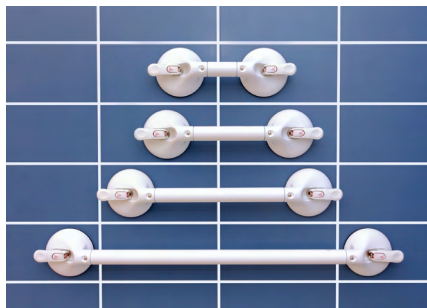

KAHVAN KIIINNITYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

- kahva painetaan tasaista, ilmatiivistä pintaa vasten
- kiristyssalvat käännetään kiinni, minkä jälkeen kahva on käyttövalmis
- kiinnitykseen ei tarvita ruuveja eikä porausta
- QuatroPlus-tukikaiteessa on neljä imuelementtiä sekä niveltekniikka
- kahvat on testattu ja hyväksytty käyttöön TÜV-järjestelmän mukaisesti
- kahvan kiinnitys on tarkistettava säännöllisesti irrottamalla kahva, puhdistamalla kiinnityspinta ja kiinnittämällä kahva uudelleen ohjeiden mukaisesti
- imuelementin saa irti kahvasta, eli kahvan pakkaaminen matkalle mukaan on helppoa
- kiristyssalpaan saatavana myös lukko, jota käyttäjät eivät saa vahingossa auki, mikä on hyvä ominaisuus esim. muistihäiriöistä kärsivien hoidossa

USEITA ERI MALLEJA

- yhden käden kahvat
- kahden käden kahvat
- teleskooppikahvat
- lasten kahvat
- stabilisaatiokahvat Stabi Vario ja Stabi Horisontaalinen
- stabilisaatiokahva Handi
- QuatroPlus-tukikaiteet
- QuatroPower-tukikaiteet



Nettisivuillamme tarkemmat mitat ja kantavuudet.