



Säätöjalan asentaminen ramppiin, jossa ei ole kaiteita

Vaihtoehto 1 (suositus)

Suora säätöjalka (831910) kiinnitetään ramppiin asennusraudalla (831917). Lyhennä jalkaa tarvittaessa.

Jos rampissa on yksi kaide jommallakummalla puolella ramppiä, kiinnitetään säätöjalka kaiteen vastakkaiselle puolelle vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Vaihtoehto 2

Käytetään kulmajalkaa (831975).

Vaihtoehdon 2 soveltaminen tasoluiskaan

Vaihtoehdon 2 mukaista asennusta voi käyttää myös tasoluiskan tukemiseen.

Huom! Ramppielementin yläpäähän tulee aina tukijalka.

Päätykaaren asentaminen

1. Kiinnitä päätykaari käsijohteeseen. Varmista, että messinkitapit ovat paikoillaan.
2. Kiinnitä vakiotoimitukseen sisältyvät putkisokat paikoilleen, 4 kpl per päätykaari.



Päätynupin asentaminen

1. Poraava käsijohteen päässä olevaa reikää 10 mm suuremmaksi.
2. Kierrä nuppi kiinni.

